



# Aufbereitung der smartwipes Dry Spenderbox


- 1** Deckel vom Behälter entfernen.

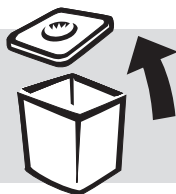


- 2** Deckel- und Behälterinnenseite, Tuchabrisse und Reservoir mit einem getränkten Desinfektionstuch aus- bzw. abwischen (bitte Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten).

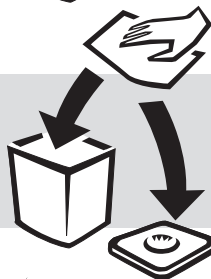

- 3** Trocknen lassen.

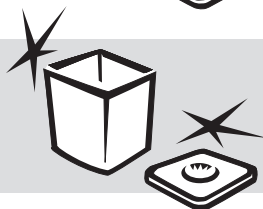

- 4** Tuchrolle in den Behälter einfügen und mit der vorgesehenen Menge Flächen-Desinfektionsmittel\* befüllen. Nach einer Einwirkzeit von 30 Minuten sind die Desinfektionstücher gebrauchsfertig.

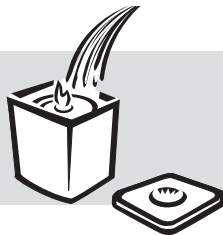

\* Herstellerangaben beachten