



Aufbereitung der smartwipes Wet Spenderbox


- 1** Deckel vom Behälter entfernen.

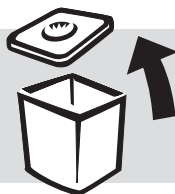

- 2** Deckel- und Behälterinnenseite, Tuchabriss und Reservoir mit einem getränkten Desinfektionstuch aus- bzw. abwischen (bitte Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten).

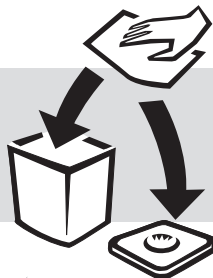

- 3** Trocknen lassen.

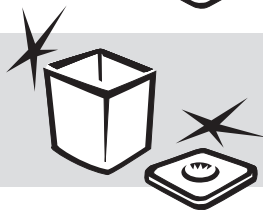

- 4** Befüllten Beutel in den Behälter stellen und unterhalb der Schweißlinie aufschneiden. Behälterdeckel auflegen. Die Desinfektionstücher sind gebrauchsfertig.

